



**SAPEURS
POMPIERS**
Ille & Vilaine

NOTE D'INFORMATION

DIRECTION DE LA SANTE ET DU SECOURS MEDICAL

POLE SANTE LOGISTIQUE

Affaire suivie par :

C. Adamy / Pharmacien- chef

☎ - 02 99 87 97 93

Références – SSSM/PUJ/CA/20-04/2020

DESTINATAIRES

Tous le SDIS

Pour diffusion à l'ensemble des SP du département 35

Le 20/04/2020

OBJET : Décontamination des combinaisons type 6 dans le cadre de l'épidémie COVID19

URGENT

Dans le cadre de la gestion des combinaisons en contexte de pénurie nationale et afin de garantir l'utilisation de matériel adéquat tout au long de la crise sanitaire, il est désormais demandé de procéder à la décontamination des combinaisons type 6 en vue de les réutiliser.

Cette procédure, rédigée en accord avec les pratiques des établissements hospitaliers et selon les recommandations de la société française d'hygiène hospitalière, autorise donc à nettoyer les combinaisons utilisées dans le cadre d'interventions Covid 19. Celles-ci seront réutilisées sous réserve du respect strict des opérations de décontamination et de la vérification des caractéristiques des tenues avant reconditionnement.

Les CIS dépourvus de lave-linge sont exonérés de cette procédure. Ils continueront à éliminer tous les EPI Covid dans les DASRI.

Le Pharmacien-chef

Pharmacien de Classe Exceptionnelle

Christine ADAMY

Pièces jointes : Protocole de décontamination des combinaisons type 6

Décontamination* tenues type 6 (combinaisons kit TNS) dans le cadre de l'épidémie de Covid-19

- 1- Lors du déshabillage ne pas déchirer la combinaison (sinon, l'éliminer aux DASRI)
- 2- Conditionner les combinaisons dans une housse hydrosoluble
- 3- Au CIS, transférer le contenu de la housse hydrosoluble dans le tambour du lave-linge. Jeter la housse aux DASRI. Puis se laver les mains à l'eau et au savon
- 4- Utiliser la lessive habituelle, ne pas mettre d'adoucissant
- 5- Programmer la machine sur un **cycle à 60°C, 30 mn minimum**
- 6- Faire sécher au choix sur une paillasse propre ou sur un cintre dans le local désinfection jusqu'au séchage complet. Ne pas utiliser de sèche-linge.
- 7- A l'issue du séchage, **vérifier l'intégrité de la combinaison** :
 - a. La combinaison doit être déperlante (test de la goutte d'eau, celle-ci doit rouler sur le matériau et ne pas l'imbiber)
 - b. La combinaison doit résister au déchirement (test des coutures et inspection de la combinaison)

➤ Si la combinaison est détériorée, l'éliminer dans les ordures ménagères
- 8- Plier la combinaison : bras, capuche, jambes
- 9- La reconditionner en sac plastique Zip

*AVIS de la Société française d'hygiène hospitalière SF2H relatif à la réutilisation de surblouses pour la prise en charge de patients COVID-19 dans un contexte de pénurie nationale du 05 avril 2020

Rappel : le Coronavirus est un virus facilement détruit par l'utilisation de détergent type savon ou lessive. De plus, il ne survit pas, même dans un milieu très favorable à une température de 60° pendant plus de 20mn.


Etapes de la procédure :



Transfert de la tenue dans le lave-linge



Lavage

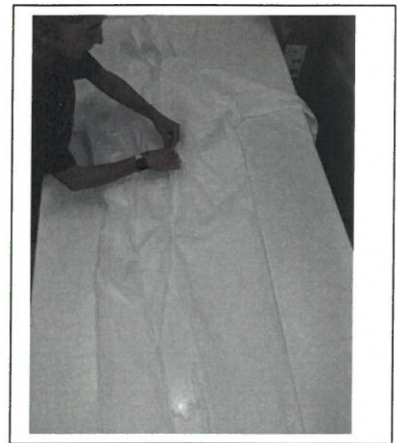

Séchage




Test de la goutte d'eau




Test des coutures et inspection



Pliage

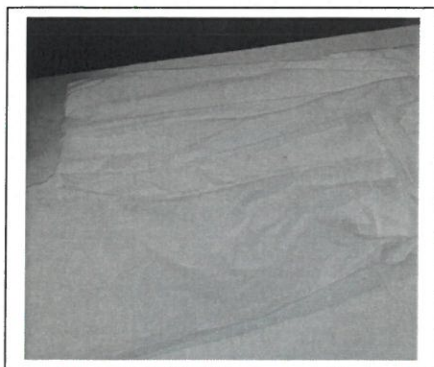

PUI-V-1

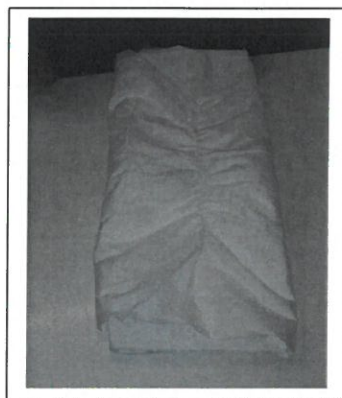

Mise en sachet