

## Décontamination des lunettes de protection pour reconstitution de kits RRE (Risque RESpiratoire)

### 1- Préparer la **solution de désinfection à 2.5%**



Volume du contenant :	Volumes du détergent-désinfectant
Pour 1 Litre d'eau	2.5 ml
Pour 2 Litres d'eau	5 ml
Pour 5 Litres d'eau	12.5 ml
<b>Pour 8 Litres d'eau</b>	<b>20 ml</b>

Attention à ne pas dépasser la concentration demandée.

Vous protéger les mains et les yeux de toute projection.

2- Immerger les lunettes pendant **1 heure minimum.**

3- Rincer les lunettes à l'eau claire

4- Les laisser sécher à l'air libre sur une **paillasse propre.**

### Pour reconstituer le kit RRE mettre en sac zip :

- 2 masques chirurgicaux
- 4 masques FFP2
- 2 paires de lunettes de protection décontaminées.